

DIRECTION GENERALE

## NOTE D'INFORMATION N°017/2020

### Objet : Port de masques

Alors que l'épidémie de Covid-19 gagne du terrain, le Ministère des Solidarités et de la Santé précise ses recommandations sur le port du masque : en l'absence de cas avéré au sein d'une structure, il n'y a pas à ce jour de préconisation du port du masque concernant le Covid-19 à titre préventif.

Ces recommandations sont permanentes et ont été prises dès le début de l'épidémie, elles sont donc sans rapport avec les informations circulant sur le manque d'équipement.

Cependant, la Fondation Père Favron, consciente des risques qui peuvent exister chez certains de nos publics fragiles, a pris la décision de mettre en place le port de masques en tissu (Cotton /Polyester), afin de protéger du mieux possible les résidents, les professionnels (et leurs familles). Ces masques sont réalisés selon les indications conformes au protocole mis en place par le CHU de Grenoble.

Ces masques assurent une protection basique et ne sont pas adaptés lorsqu'un cas de coronavirus est identifié au sein d'une structure.

Dans une telle situation, nous procéderons à la mise en place de masques chirurgicaux ou FFP2, en fonction des professionnels concernés.

La livraison de ces masques en tissu devrait démarrer dès cette fin de semaine dans les premières structures, et nous espérons pouvoir équiper l'ensemble des professionnels dès la semaine prochaine.

Saint-Pierre, le 19 mars 2020

**Jean-Paul PINEAU**  
Directeur Général



Fondation reconnue d'utilité publique par décret du 20.08.1997

Direction Générale - 80 Boulevard Hubert Delisle - BP 380 - 97456 Saint-Pierre Cedex

☎ 0262.91 80 00 - Fax 0262.91 80 18 - [dgl@favron.org](mailto:dgl@favron.org) - <http://www.favron.org>

Foyer Albert Barbot (Pôle Handicap et Insertion - Pôle Handicap et Dépendance) - Pôle Social

Institut Médico-Social Charles Isautier - Pôle Médico-Social Raphaël Babet - Pôle Médico-Social Philippe de Camaret

Pôle Gériatrique Ouest (EHPAD Les Lataniers - EHPAD Les Alizés - EHPAD Fabien Lanave)

Pôle Gériatrique Roger André (EHPAD Bois d'Olives - EHPAD Bras-Long - EHPAD Ravine Blanche)

## I. Objet

Dans le cadre d'une situation dégradée et pour pallier à la pénurie de masque de soins, un modèle de création de masque de soins en textile est proposé pour :

- Permettre de se protéger
- Continuer son activité professionnelle
- Permettre le maintien de l'activité de l'établissement et la prise en charge des patients

## II. Secteurs et professionnels concernés

Tous les professionnels du CHUGA :

- Des services de soins ne prenant pas en charge de patients Covid-19\*
- Des services supports

\* les services prenant en charge les patients Covid-19 sont :

- Médecine infectieuse
- Secteurs de réanimation
- Pneumologie
- Les services de médecine interne (3<sup>ème</sup> A, B et C)



## III. Fabrication et entretien du masque de soins textile

Matériel nécessaire pour la réalisation :

- Chutes de coton (environ 20 cm) pour l'extérieur et la doublure
- Molleton fin, polaire fine, ...
- Elastique souple



Le masque de soin est composé de 2 couches de tissus en coton et 1 couche de molleton disposée entre les 2 couches.

Patron en annexe

Entretien du masque :

- Celui-ci est à la charge du professionnel
- Le laver **quotidiennement** à son domicile à 30°C avec du détergent classique

## IV. Etapes de fabrication

1- Découper le patron ( <b>annexe</b> )
2- Découper les pièces de tissus en coton nécessaire (voir patron) : nous obtenons 4 pièces de tissus
3- Découper le molleton (voir patron) : nous obtenons 2 pièces de molleton
4- Couper environ 2 élastiques de 30 cm pour le grand modèle (adapter la longueur à la taille souhaitée)
5- Assembler les 2 pièces de tissu « extérieur » « endroit contre endroit » partie arrondie
6- Faire le même assemblage pour les 2 pièces tissu doublure
7- Assembler les 2 pièces de tissus obtenues « endroit contre endroit » en insérant les 2 pièces de molleton Coudre uniquement en haut et en bas : ne pas coudre les petits côtés
8- Retourner l'ensemble sur l'endroit
9- Surpiquer la couture centrale (verticale)
10- Surpiquer le haut et le bas à quelques millimètres du bord
11- Replier les petits côtés (2 fois 1 cm) - repasser
12- Piquer à quelques millimètres du pli pour créer une coulisse
13- Faire glisser le nœud dans la coulisse pour le confort

